



GIP-IMPLANTATION

Chirurgische Anleitung

1. Erste Markierungsbohrung im Knochen (Q6109 + Q5109 + Q5111 + Q5112)

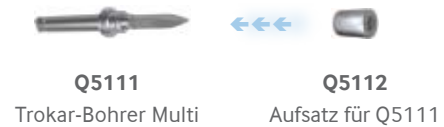



2. Ausweitung der Bohrführung (SDQ3 + Q5113)

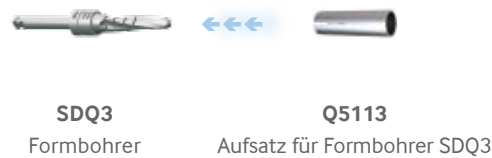

3. Pilotbohrung (Q6108 + Q5108)



4. Formbohrung (je Länge) Q5104 (5, 6, 7) oder Q5104K (5K, 6K, 7K)

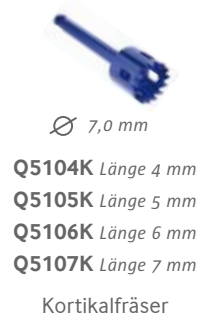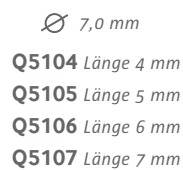

5. GIP4, 5, 6, 7




$\varnothing$ 6,3 mm $\varnothing$ 7,0 mm
 Länge Art. Nr. Art. Nr.

4 mm	63GIP104	GIP4
5 mm	63GIP105	GIP5
6 mm	63GIP106	GIP6
7 mm	63GIP107	GIP7

6. Manuelle Insertion (IWQL oder IWQS + HWQ1 + DHQ1)



kurz
IWQS

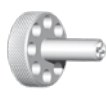

lang
IWQL
Einbringschlüssel



HWQ1
Handrad



DHQ1
Handradschlüssel



7. Insertion mit Drehmoment Ratsche (Q2112 + IKQ3 + QX30)



Q2112
Handstück für Schraubendreher



IKQ3
Einbringhilfe für Winkelstück



QX30
Universal Drehmoment Ratsche



8. Auf Knochenlevel

9. Provisorische Versorgung (Q5001, Q5002, Q5003, PQ-04 - PQ-10.5)



Q5001 – S
Q5002 – M
Q5003 – L
Silikonkappe



PQ-04 - PQ-10.5
4 mm - 10,5 mm
Easy Temporary Cap